


ACCESS B5

Hydraulischer Poollift für den Wasserzugang von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Robust, komfortabel und sicher, mit zwei Installationsoptionen und verschiedenen Ankerarmlängen für jeden Erdpool.

VORDERANSICHT

Ausgangsposition. Sitz außerhalb des Wassers.

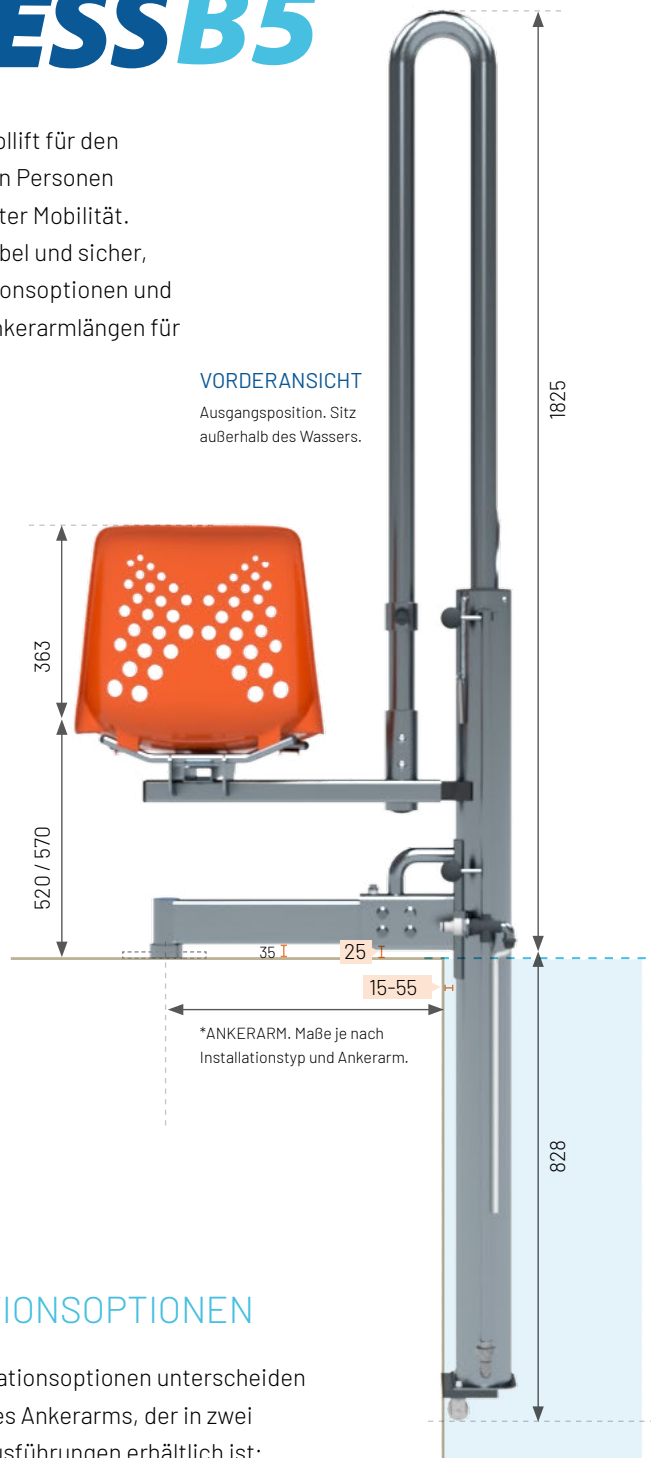


TECHNISCHE MERKMALE

Maximale Traglast	150 Kg
Schwenkwinkel	180°
Drehradius	750 mm
Hub	1080 mm
Druckbereich	3,5 a 5 bars
Wasservolumen / Zylinder	10 L
Ankerarm	250-1200 mm
Mindesttiefe am Installationsbereich	850 mm
Rahmenmaterial	Inox 316L
Sitzmaterial	Polipropilene
Absenzeit/Hubzeit (leer)	90 / 20 s
Absenzeit/Hubzeit (80 kg)	35 / 20 s
Gewicht	~ 40 Kg


ZWEI INSTALLATIONSOPTIONEN

Die beiden Installationsoptionen unterscheiden sich nur im Typ des Ankerarms, der in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich ist:

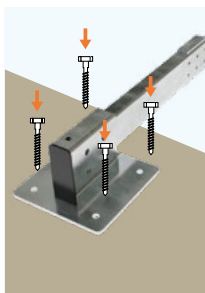

FESTE INSTALLATION

Dauerhaft und stabil. Der Ankerarm verfügt über eine Basis, die direkt auf der Oberfläche verschraubt wird.

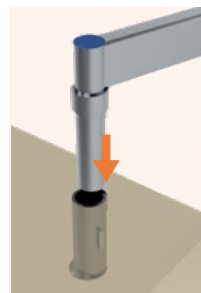

MOBILE INSTALLATION

Zum einfachen Entfernen und Installieren. Der mit einem Zylinder (mit Flansch) abschließende Arm wird in einen zuvor eingelassenen Anker eingeführt.

ACCESSB5

► FESTE INSTALLATION

mit Schraubbasis.

Wie wird es installiert?

Löcher in den Boden bohren, den Lift aufstellen und mit 4 Schrauben befestigen.

ANKERARMOPTIONEN

L	750 / 800 mm
---	--------------

► MOBILE INSTALLATION

mit eingelassener Bodenverankerung.

Wie wird es installiert?

Eingelassene Verankerung bohren und versiegeln. 24h trocknen lassen. Lift einsetzen.

ANKERARMOPTIONEN


S	250 / 300 mm
M	500 / 550 mm
L	750 / 800 mm
Anpassbar*	≤ 1200 mm

* Maße vom Kunden anzugeben.

Hilfe-Leitfaden


VORDERANSICHT

Armabüführung je nach Installationstyp:


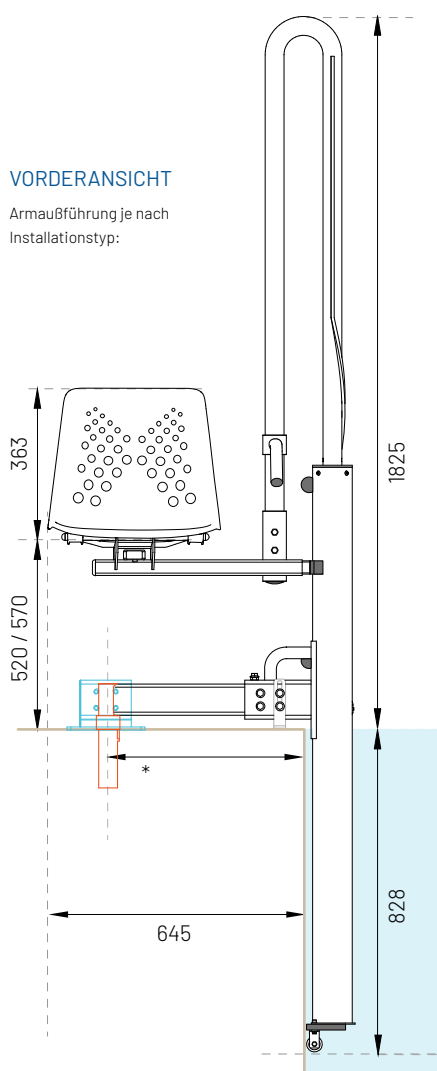


Armabüführung je nach Installationstyp:



FESTE INSTALLATION

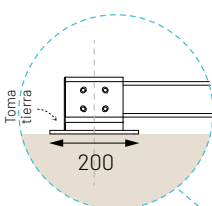

MOBILE INSTALLATION

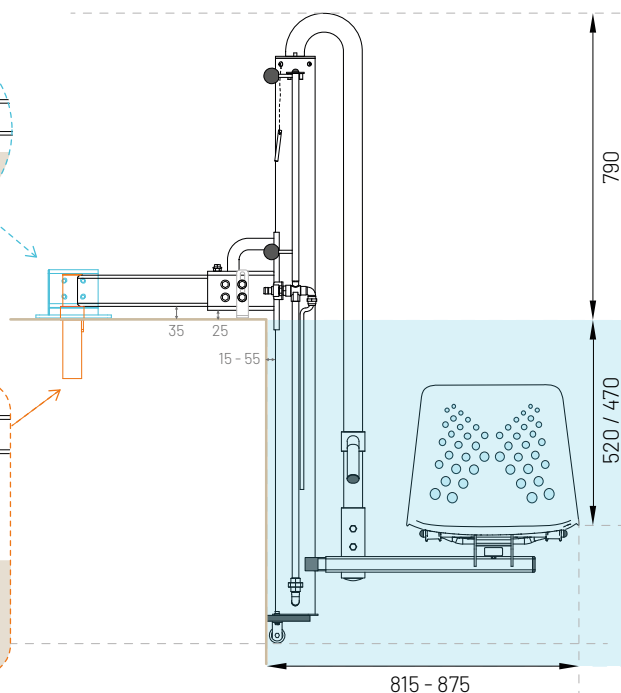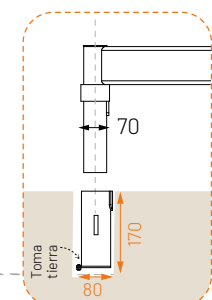

DRAUFSICHT

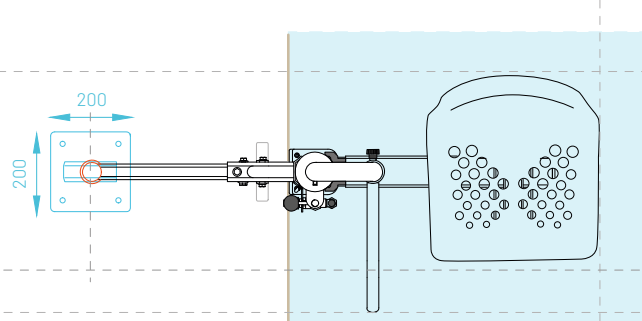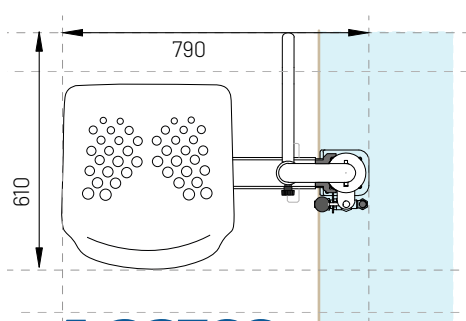

ACCESS B5

WICHTIGE HINWEISE



Auf beiden Seiten des Lifts mindestens ein Meter freier Raum für die Drehbewegung und Nutzbarkeit (innerhalb und außerhalb des



Mindesttiefe 85 cm. Mit Fußstütze 95 cm.



Starre und ebene Oberfläche für die Verankerung und Gewichtsaufnahme.



Die Sitzhöhe und der Ankerarm sind einstellbar. Die Innenwandstütze (Gleitblock) ermöglicht horizontale Verstellung.



Optimiert für gemauerte Erdpools. Liner- oder Polyesterpools benötigen das Liner Stützblock-Zubehör.

* Wenn das Beckenrandprofil mehr als 20 mm übersteht oder der Abstand zwischen Wasserstand und Beckenrand mehr als 15 cm beträgt, wenden Sie sich bitte an unsere Techniker:

(+34) 93 595 18 36

VERSAND

KARTON 1: 1616 x 400 x 161 mm

Inhalt: Lift und Ankerarm

KARTON 2: 700 x 400 x 530 mm

Inhalt: Sitz, Armlehnen, Zubehör, Befestigungsmittel und Bedienungsanleitung. Einbau Ankerbasis*

*Bitte nach Palettenversandoptionen anfragen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die Maschine entspricht der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen, die durch das Königliche Dekret 1644/2008 in spanisches Recht umgesetzt wurde.

ZUBEHÖR



1 FUSSSTÜTZE

Ermöglicht dem Benutzer, die Füße abzustützen. Erforderliche Tiefe: 95 cm.



2 2-PUNKT-SICHERHEITSGURT

Zur Sicherung des Benutzers um die Taille für mehr Sicherheit.



3 LINERSTÜTZBLOCK

Flexibler Stützblock zur Kraftverteilung auf der Wand und zum Schutz des Pools.



4 U-STÜTZE

Stützpunkt zur Verbesserung von Widerstand und Stabilität.



5 MANOMETER

Zur Regelung des Wassereingangsdrucks am Hebewerker.



6 DRUCKERRÖHUNGSSET

Set mit Pumpe zur Sicherstellung des erforderlichen Wassereingangsdrucks am Lift.

Die Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde durch die Anwendung der harmonisierten Normen nachgewiesen:

UNE-EN ISO 12100:2012
UNE-EN ISO 13849-1:2023
UNE-EN ISO 4413:2011
UNE-EN ISO 14118:2018
UNE-EN IEC 61310-1:2008

Diese Erklärung wird im Rahmen der Richtlinie 2006/42/EG abgegeben, die für Maschinen gilt, die vor dem 20.01.2027 in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden; ab diesem Datum wird die Verordnung (EU) 2023/1230 allgemein anwendbar.